


Chelino, Stuhl mit Aufstehhilfe

Automatische Rücklaufbremse

Automatische Bremsen innerhalb der Hinterrollen verhindern ein nach hinten Rollen des Stuhls während des Sitzens und Aufstehens. Erst wenn die Sitzfläche die unterste Position erreicht hat, werden die automatischen Bremsen gelöst und der Stuhl ist frei beweglich.


Durch Betätigung der Auslöseknöpfe an den oberen Enden der hinteren Stuhlbeine kann Chelino auch bei angehobener Sitzfläche rückwärts geschoben werden.

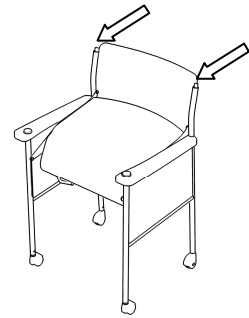

Setzen


Beide Auslöseknöpfe an den Armlehnen mit den Daumen oder Handballen gedrückt halten und anschließend setzen. Langsame Gewichtsverlagerung nach hinten bis die Sitzfläche absinkt.

Wenn die gewünschte Sitzhöhe erreicht ist, können die Knöpfe losgelassen werden. Die Sitzfläche ist dann auf dieser Höhe fixiert.

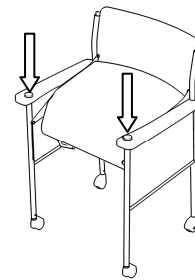

Aufstehen

Beide Auslöseknöpfe an den Armlehnen mit den Daumen oder Handballen gedrückt halten und wie gewohnt aufstehen. Durch Loslassen der Auslöseknöpfe kann der Aufstehvorgang auch jederzeit abgebrochen werden.

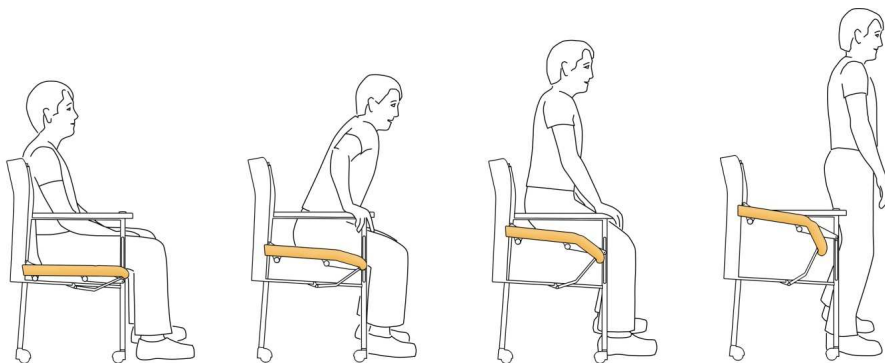

Um die Setz- und Aufstehunterstützung optimal abzustimmen, wird Chelino mit Gasdruckfedern versehen, die dem Gewicht und der Größe des Benutzers entsprechen.